

UTILISATION DU DEFIBRILATEUR AUTOMATIQUE EXTERNE (D.A.E.)



UTILISATION

- Allumer le défibrillateur;
- Suivre **IMPÉRATIVEMENT** les instructions vocales;
- Mettre le thorax à nu, le sécher si besoin;
- Coller les électrodes
- Connecter les électrodes au défibrillateur si besoin ;

NE PAS TOUCHER LA VICTIME PENDANT L'ANALYSE ET LA DÉLIVRANCE DU CHOC

- Délivrer le choc si nécessaire;
- Continuer la Réanimation Cardio-Pulmonaire (RCP) jusqu'au relai des secours ou la reprise d'une respiration normale;
- Conserver le défibrillateur en fonction et les électrodes en place jusqu'à l'arrivée



ATTENTION



- **Sur sol mouillé** : déplacer la victime sur une surface sèche et sécher le thorax
- **Sur une surface métallique** : glisser une couverture sous la victime (une couverture par exemple)
- **Ne pas utiliser en milieu toxique ou inflammable**
- **Si présence d'un stimulateur cardiaque**, l'électrode se situe à un travers de main de l'appareil (environ 8 cm de la bosse perçue)